



Zemits VivoTite

*SYSTÈME DE MICROCURRENT POUR LE
RAFFERMISSEMENT DE LA PEAU*

Lisez attentivement ce guide d'installation et d'utilisation et conservez ces instructions pour toute référence ultérieure.

Précautions

- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants, d'invalides ou de personnes handicapées.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce guide.

Utilisez uniquement les têtes de traitement et les accessoires fournis par Zemits.

- N'utilisez pas de détergents, de solvants, de produits chimiques ou d'éponges abrasives pour nettoyer l'appareil.
- Utilisez les lingettes alcoolisées ou les lingettes imbibées d'une solution bactéricide.
- N'utilisez jamais le dispositif sur des bijoux ou des piercings.

Les résultats peuvent varier selon l'âge, le mode de vie (activité sportive, alimentation, etc.) et la morphologie.

Contenu de l'emballage

La VivoTite est livré avec tous les accessoires nécessaires aux services du visage.

L'emballage contient :

1. L'appareil VivoTite
2. La base de chargement
3. Le couvercle de protection des broches métalliques
4. Le câble de chargement
5. Le présent guide d'installation et d'utilisation

Conservez l'emballage d'origine de votre appareil pendant toute la durée de la garantie. Tout retour pendant cette période doit inclure l'emballage d'origine.

Description de l'appareil

Le VivoTite est l'appareil esthétique avancé et à domicile développé par Zemits et inspiré de son expérience en matière de stimulation de la peau.

Le corps de la machine contient le panneau de commande et les broches de microcourant.

1. Électrodes de microcourant
2. Entrée de charge
3. Bouton marche/arrêt et réglage de l'intensité

Première utilisation et préparation

- Déballiez votre dispositif VivoTite, la base de chargement et le cordon.
- Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil et branchez le cordon dans la prise murale. Placez votre appareil sur la base de chargement.
- Chargez votre appareil pendant 8 heures avant la première utilisation.

Nous recommandons un cycle de charge complet de 8 heures si la batterie est complètement déchargée. Un appareil entièrement chargé devrait durer environ 2 à 3 semaines d'utilisation sur la base d'un traitement quotidien de 10 minutes.

Étapes pour faire fonctionner la VivoTite

- **Étape 1 :** Chargez complètement votre appareil
- **Étape 2 :** Appliquez le gel conducteur sur la zone traitée
- **Étape 3 :** Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes
- **Étape 4 :** Appuyez à nouveau sur le bouton Power pour régler le niveau d'intensité de 1 à 4, commencez par le niveau 1

IMPORTANT

Maintenez la zone traitée humide pendant toute la durée du traitement.

Informations importantes sur la sécurité

Avant toute installation et utilisation, il est vivement conseillé de lire les instructions présentées dans ce chapitre.

DANGER

Pour réduire le risque d'électrocution, ne laissez pas le tuyau passer dans l'eau pendant la charge. Ne pas faire tomber l'appareil.

Contre-indications

N'utilisez pas l'appareil en cas de contre-indications ou sans avoir lu attentivement cette section et pris connaissance des précautions figurant dans ce guide.

- ❖ Si vous avez des doutes sur la compatibilité de la santé de votre client avec l'utilisation de l'appareil, consultez un médecin.
- ❖ L'appareil peut être utilisé sur toutes les parties externes saines du corps, à l'exception des yeux, des oreilles, de la glotte et des organes génitaux. L'appareil ne doit pas être utilisé sur les muqueuses, les mamelons, la colonne vertébrale ou tout grain de beauté suspect sans avis médical.
- ❖ En cas de grossesse, ne pas utiliser l'appareil.

Certaines pathologies peuvent nécessiter un avis médical auprès de votre médecin. N'utilisez pas l'appareil sur des personnes présentant :

- ❖ Des problèmes d'épilepsie
- ❖ Un trouble de la coagulation du sang
- ❖ Des problèmes cardiaques
- ❖ Des douleurs ou des rougeurs
- ❖ Des picotements dans les membres
- ❖ Fièvre, infection, inflammation, dermatite aiguë, plaies ouvertes, cicatrices récentes, ou toute maladie grave et/ou évolutive.
- ❖ Pour les patients ayant une utilisation prolongée de médicaments (anti-inflammatoires, anticoagulants, antibiotiques), veuillez demander à votre client de consulter un médecin avant d'utiliser ce dispositif.

Si des effets secondaires liés aux traitements du dispositif apparaissent pendant ou après l'utilisation, veuillez contacter le service clientèle de Zemits.

Protocole de traitement

- Nettoyer soigneusement le visage
- Sur une peau propre et sèche, appliquez le gel conducteur sur la zone traitée.
- Assurez-vous que le gel conducteur recouvre la zone de la peau pendant toute la durée du traitement.
- Allumez l'appareil en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton ON/OFF situé à l'avant de votre appareil.
- Réglez le niveau d'intensité selon votre confort en appuyant sur le même bouton.

Le traitement VivoTite Facial est un traitement très doux et apaisant. Gardez toujours les deux sphères sur votre visage en même temps.

Conseil pour de meilleurs résultats : Exfoliez votre peau avec le gommage à ultrasons SonoSilk de Zemits 1 à 2 fois par semaine pour améliorer la santé de votre peau.

N'utilisez pas le microcourant sur les personnes ayant :

- ❖ Des problèmes d'épilepsie
- ❖ Des stimulateurs cardiaques
- ❖ Implants métalliques
- ❖ Trouble de la coagulation sanguine
- ❖ Problèmes cardiaques
- ❖ Douleur ou rougeur
- ❖ Fourmillement dans les membres
- ❖ Fièvre, infection, inflammation, dermatite aiguë, plaies ouvertes, cicatrices récentes ou toute maladie grave et/ou évolutive.
- ❖ Pour les patients ayant un usage prolongé de médicaments (anti-inflammatoires, anticoagulants, antibiotiques), veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

Si des effets secondaires liés aux traitements par microcourant apparaissent pendant ou après l'utilisation, veuillez contacter le service clientèle de Zemits.

IMPORTANT

- ✓ Appliquez toujours du gel avant de placer les sondes sur la peau.
- ✓ Assurez-vous que vous ou votre client ne portez pas de bijoux ou de métal.

Étape du protocole de traitement pour le visage


Appliquez le gel conducteur sur la zone de traitement avant d'utiliser votre appareil VivoTite.

1. TONIFICATION DE LA MÂCHOIRE

- Positionnez votre appareil sur votre mâchoire
- Faites glisser lentement votre appareil depuis le début de votre pommette, près de votre nez, jusqu'à la partie inférieure de votre oreille.

2. RÉDUCTION DES PLIS NASOGÉNIENS

- Placez votre appareil sous votre pommette, près de votre nez, pour réduire le sillon nasogénien.
- Faites glisser lentement votre appareil du début de votre pommette, près de votre nez, jusqu'à votre oreille.

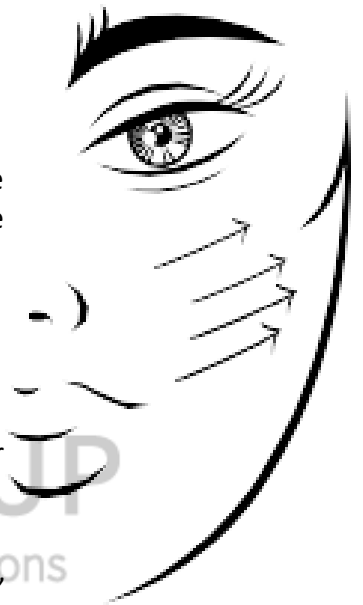

Répétez chaque étape 5 fois au total. Chaque glissement doit prendre entre 5 et 7 secondes.

Étape du protocole de traitement pour le front et les sourcils

- Appliquez le gel conducteur sur la zone de traitement avant d'utiliser votre dispositif VivoTite.
- Positionnez votre appareil sous votre sourcil.
- Effectuez des mouvements vers le haut pour tonifier le muscle orbital et soulever le sourcil.
- Placez votre appareil au-dessus de votre sourcil.
- Faites glisser lentement votre appareil vers le haut, vers la racine des cheveux.



Répétez chaque étape 5 fois au total. Chaque glissement doit prendre entre 5 et 7 secondes.

Étape du protocole de traitement pour le contour des yeux

- Appliquez le gel conducteur sur la zone de traitement avant d'utiliser votre dispositif VivoTite.
- Positionnez votre dispositif sur l'os orbital, sous l'œil.
- Effectuez de légers mouvements circulaires et rapides sur le contour de l'œil, comme si vous effaciez littéralement les lignes.

Répétez chaque étape pendant 3 minutes au total pour chaque œil

Étape du protocole de traitement pour les lèvres

- Appliquez le gel conducteur sur la zone de traitement avant d'utiliser votre appareil VivoTite.
- Positionnez l'appareil au centre des lèvres.
- Effectuez un traitement en déplaçant l'appareil du centre de vos lèvres vers l'extérieur en effectuant de légers mouvements d'effleurement.

Répétez chaque étape pendant 3 minutes au total pour chaque œil

Que faire si vous avez un problème

- Assurez-vous d'abord que vous avez bien suivi les instructions d'installation et d'utilisation préalables.
- Si votre machine ne fonctionne pas normalement, avant d'appeler le service clientèle de Zemits, il est conseillé d'effectuer les contrôles suivants :
 - Les précautions d'usage ont-elles été respectées ? La machine est-elle chargée ?
 - Le bouton marche/arrêt a-t-il été sélectionné ? Le panneau d'affichage est-il allumé ?
- Après avoir effectué ces contrôles et si le problème persiste, veuillez contacter le Service Clientèle ou un distributeur agréé, en indiquant les coordonnées de l'acheteur.

Maintenance

Il est important de nettoyer régulièrement votre machine, pour des raisons d'hygiène, pour la maintenir en bon état de fonctionnement et garantir l'étendue de sa vie utile.

Nettoyez les sondes des restes de gel, et vaporisez les sondes avec de l'alcool à 70%-90% ou un désinfectant prouvé EPA.

Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat.

Le produit ne doit pas être altéré, modifié ou réparé par une personne non autorisée. Le produit doit avoir été utilisé de manière normale, comme décrit dans le manuel d'utilisation. Les dommages causés par une utilisation incorrecte de l'équipement ne sont pas couverts par la garantie. Zemits peut remplacer les composants sous garantie plutôt que de les réparer. La garantie ne couvre pas l'usure normale.

En cas de réparation, Zemits testera l'équipement et vous informera du processus de réparation.