



Zemits OcuRelax

Massage relaxant pour les yeux

I. Contenu

Nous vous remercions d'avoir acheté le produit OcuRelax de Zemits. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de commencer à utiliser l'appareil.

II. Principe du produit

Basé sur les principes de la science des méridiens et de la beauté de la médecine traditionnelle chinoise, le masser oculaire à pression d'air intelligent avec Bluetooth, utilisant une puce de micro-ordinateur, peut aider les yeux à ajouter de l'oxygène et à éliminer l'obstruction des méridiens, à améliorer la circulation sanguine, à soulager la fatigue oculaire mais également aide à la détente.

1. Pression d'air intelligente ; sous le contrôle de la puce, la pression peut dégager les méridiens des yeux et du cerveau pour soulager la fatigue en pétrissant les points d'acupuncture importants du contour des yeux.
2. Température constante ; en utilisant un élément chauffant en fibre de carbone pour maintenir la température à 42°.
3. Guidé par la musique : ce produit utilisant une musique de pression apaisante, vous pouvez détendre tout votre corps et prendre soin de vos yeux.


III. Utilisation

Le produit peut être utilisé par :

- Des étudiants,
- Des personnes portant des lunettes,
- Des personnes travaillant dans l'administratif,
- Des personnes utilisant beaucoup les écrans (ordinateur, portable,...)
- ...



IV. Contenu

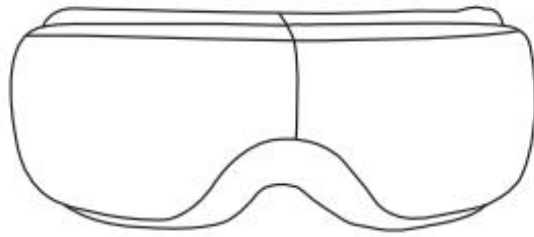

→ Paire de lunettes



← Chargeur



→ Guide d'utilisation



V. Préparation à l'utilisation

Veillez vérifier s'il est nécessaire de charger le produit. Si la fonction du produit ne peut pas être utilisée ou si le produit ne peut même pas démarrer lorsque la capacité de la batterie est faible, veuillez l'utiliser après la recharge.

Après une charge complète, veuillez débrancher l'adaptateur secteur afin de prolonger la durée de vie du produit.

a. Charge

1. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise USB
2. Le voyant lumineux est rouge pendant la charge, il deviendra bleu une fois la batterie complètement chargée
3. Le produit ne peut pas être utilisé pendant le chargement (si vous l'utilisez pendant sa charge, il exécutera le processus d'auto protecteur et cessera de fonctionner)
4. La partie principale du produit a une batterie rechargeable intégrée
5. Veuillez cesser de l'utiliser lorsque le produit vous indique que la batterie est faible.

Plusieurs façons de charger le produit	
Le mode de charge	Via le port USB de l'ordinateur
	Grâce à l'alimentation mobile
	Via une prise de chargeur standard (recommandé)

b. Temps de service

La durée d'utilisation par défaut est de 10 minutes.



VI. Mode d'emploi

- Appuyez longuement sur ON/OFF, pendant 3 secondes pour ouvrir le produit, le mode par défaut est le mode « automatique ».
- Pour changer de mode (il en existe 3), cliquez sur ON/OFF
- Pour fermer le produit, appuyez longuement sur ON/OFF pendant 3 secondes

c. Différents modes

1. Mode Automatique : Pression + chaleur chaude + musique
2. Mode dynamique : Pression + musique
3. Mode sommeil : chaleur chaude + musique

VII. Précautions d'emploi

Pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, veuillez consulter le manuel d'utilisation avant toute utilisation.

1. N'utilisez pas les lunettes de massage en marchant ou conduisant
2. N'utilisez pas les lunettes dans un endroit chaud et humide
3. N'utilisez pas les lunettes si vous avez des problèmes aux yeux (lentille de contact (nécessite de les enlever), glaucome, décollement de la rétine, AVC, hypertension, ...)
4. Utilisez le produit sous surveillance d'une personne majeure
5. Ne pas utiliser de l'eau avec le produit
6. Ne démontez pas l'appareil vous-même
7. Veuillez fermer les yeux pendant l'utilisation du produit

VIII. Entretien

- Si les lunettes sont sales, veuillez les nettoyer avec un chiffon doux et sec.
- Après utilisation, le produit doit être placé dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et de la pollution.



IX. Transport et stockage

Pression atmosphérique : 86 kpa-106 kpa

Température ambiante : 18-25°

Transport : ce produit est doté d'installations simples antichoc. Il convient au transport aérien, ferroviaire, routier et maritime. Il doit éviter la pluie, les éclaboussures, la neige et les collisions.

X. Dépannage

En cas de problème de fonctionnement et si le problème est éliminé mais le produit ne peut toujours pas fonctionner, veuillez éteindre l'appareil et contacter le service après-vente de Milànton.

XI. Spécification du produit

Nom	OcuRelax
Tension de charge	DC5V
Puissance nominale	4,5
W courant de charge	< 2A



XII. Certificat

La garantie du produit est de 2 ans à daté de l'achat.

Carte de garantie

Nom et prénom du client	
N° de téléphone	
Adresse	
Adresse email	
Nom du produit	OcuRelax
Date d'achat	

