



## ***Zemits Purekio***

*Haute fréquence*



**ZEMITS**  
KOSMETIK EXPERTE



Merci d'avoir choisi Zemits.

Nous sommes ravis de partager avec vous nos années d'expertise dans le domaine des soins de la peau et des équipements de traitement du corps. Basé sur les technologies professionnelles de Zemits.

Suivez simplement les instructions fournies dans ce guide.

Lisez attentivement ce guide d'installation et d'utilisation et conservez ces instructions pour toute référence ultérieure.

## **1. Avertissement**

- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes porteurs de handicaps.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce guide.

Utilisez uniquement les têtes de traitement et les accessoires fournis par Zemits.

- N'utilisez pas de détergents, de solvants, de produits chimiques ou d'éponges abrasives pour nettoyer l'appareil.
- Utilisez les lingettes alcoolisées ou les lingettes imbibées d'une solution bactéricide.
- N'utilisez jamais le dispositif sur des bijoux ou des piercings.


Les résultats peuvent varier selon l'âge, le mode de vie (activité sportive, alimentation, etc.) et la morphologie.



## **2. Précautions à prendre**

- Pour les peaux sensibles, veuillez recouvrir un morceau de voile pour éviter une stimulation excessive.
- Ne pas placer sur une même partie plus de 10 secondes.
- Les femmes enceintes et les personnes portant un stimulateur cardiaque ne sont pas aptes à recevoir ce traitement.
- Veuillez à installer le tube de verre dans la pièce à main avant d'allumer la machine, puis réglez l'intensité sur "0" après avoir terminé.
- La peau avec des taches de rousseur ne convient pas à ce traitement.



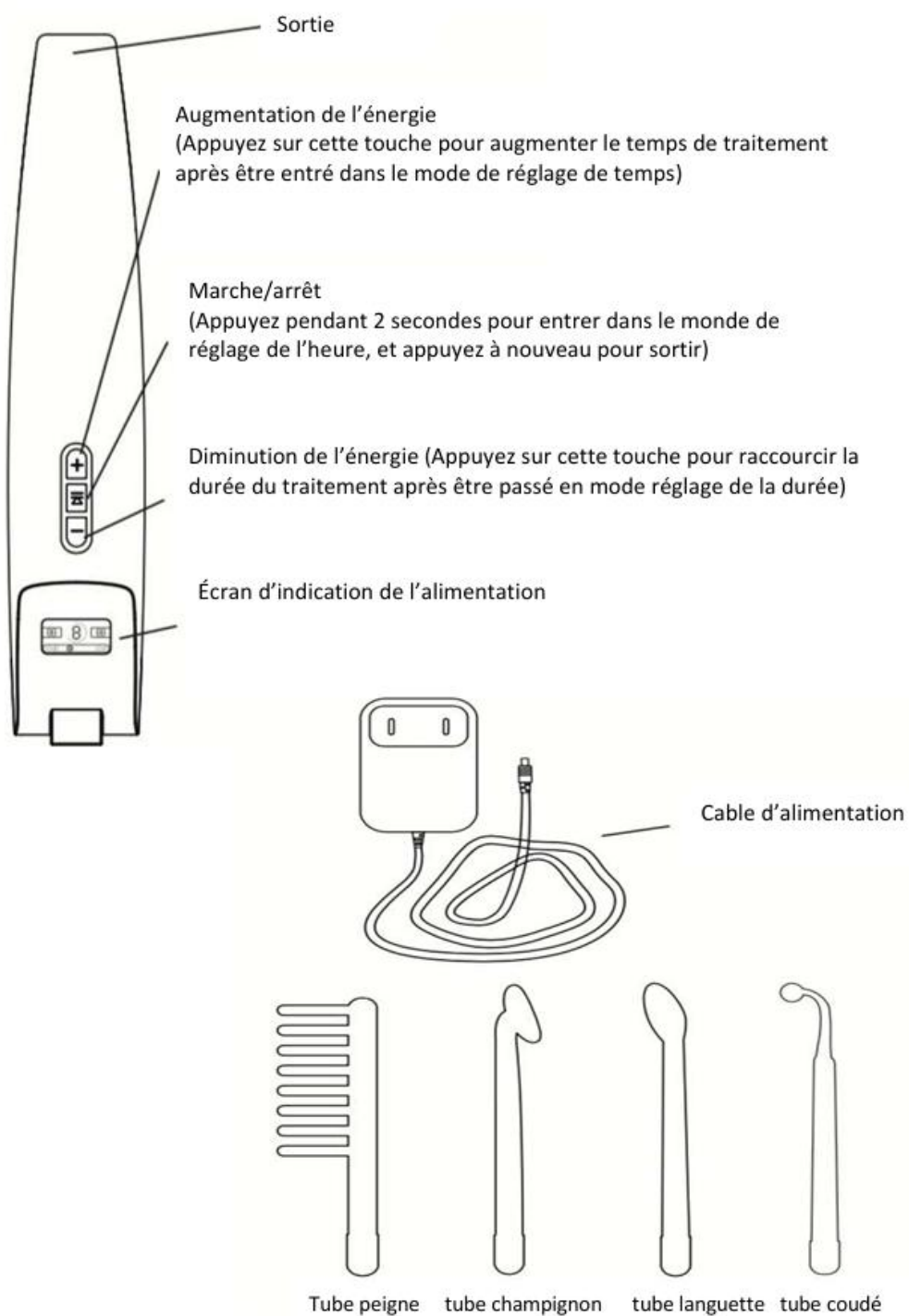

### **3. Instructions principales**

L'électrothérapie à haute fréquence est un instrument de beauté important. Il produit un courant à haute fréquence pour effectuer un traitement facial à travers le tube d'électrode en verre, ce qui permet d'obtenir un effet de traitement idéal.

1. Il aide à calmer le nerf et a une fonction analgésique.
2. Il produit de l'ozone pour la stérilisation, ce qui aide à guérir les blessures et à limiter les pores.
3. Il accélère la circulation sanguine et améliore le métabolisme.
4. Il a la fonction d'anti-âge, anti-rides et de resserrement.

### **4. Procédures de fonctionnement**

1. Méthode directe :

Veuillez d'abord appliquer de l'essence ou de la crème sur le visage. Il est nécessaire d'appliquer le tube contre le visage avant d'allumer l'appareil.

### **5. Sécurité**

- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas d'effectuer d'autres opérations qui ne sont pas indiquées dans nos instructions. Tous les travaux de réparation doivent être effectués par notre personnel professionnel agréé.
- Ne montez pas ou n'utilisez pas cet équipement lorsque vous êtes près de l'eau ou lorsque vos mains sont mouillées. Notez que vous ne devez pas verser de liquide sur l'appareil.



- Veuillez débrancher la fiche de la prise lorsque vous rencontrez les conditions suivantes et contactez le centre de maintenance professionnel.

a. L'appareil a touché du liquide.

b. L'équipement dégage une odeur anormale, fume ou émet un bruit fort et intense.

c. Le câble est cassé.

d. L'équipement est tombé et cassé.

- Ne mettez rien sur les câbles, ne placez pas l'équipement à un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le câble.
- Pour votre sécurité, veuillez retirer le câble d'alimentation après l'avoir utilisé.
- Ne mettez rien dans la prise de l'équipement, sinon cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Si quelque chose entre dans l'équipement, ne le retirez pas vous-même. Contactez immédiatement notre distributeur.
- Ne posez pas l'appareil sur quelque chose qui ne tient pas debout, pour éviter qu'il ne se renverse ou ne se casse.
- Notre société se réserve le droit de modifier les informations contenues dans cette introduction avant de les notifier et conserve le droit d'explication pour ce qui précède.

## **6. Méthode de traitement (Visage)**

1. Placez l'électrode souhaitée sur l'appareil à haute fréquence.

2. Mettez l'appareil en marche et réglez la puissance sur la position appropriée en fonction du niveau de confort ressenti.

3. Placez votre index sur l'électrode en verre. Ne retirez pas votre doigt avant que l'électrode ne soit en contact avec la peau. Retirez le doigt trop tôt - crée un effet d'étincelle inconfortable sur la peau.



4. Faites glisser l'électrode sur le visage dans un mouvement circulaire. Maintenez un contact continu, sans vous éloigner de plus de 5mm. Commencez par le front, puis passez au nez, aux joues et au menton.

5. Placez un doigt sur l'électrode lorsque vous avez terminé avant de retirer l'électrode du visage.

6. Traitez les zones à problèmes, comme les imperfections individuelles, en faisant des "étincelles" sur la zone concernée avec le bord de l'électrode. Placez votre doigt sur l'électrode, touchez l'électrode sur la zone et retirez votre doigt.

Remettez rapidement votre doigt sur l'électrode, retirez l'électrode du visage et répétez l'opération sur une autre zone.

7. Mettre l'appareil hors tension. Nettoyer l'électrode avec une solution d'eau et de savon - ne pas immerger l'électrode dans l'eau ou mouiller l'extrémité métallique. Sécher l'électrode avec une serviette propre et la ranger.







## **7. Conseils**

Il y aura une forte odeur créée par l'ozone, ce qui est normal et n'est pas le signe d'un problème.

Vous pouvez utiliser un tissu sur le visage pour un traitement plus doux.

Il est fortement recommandé d'utiliser le protocole avancé de rajeunissement de la peau et de lutte contre l'acné avec un masque d'argile et un appareil à haute fréquence :

1. Nettoyer le visage
2. Appliquer le masque et attendez 2-3 minutes pour que le masque sèche.
3. Effectuer le traitement Haute Fréquence
4. Retirer le masque avec une serviette chaude.

## **Avertissement**

Ne l'utilisez pas sur une peau rouge ou inflammatoire. La haute fréquence ne convient pas aux femmes enceintes et les personnes souffrant d'hypertension, de problèmes cardiaques, de stimulateurs cardiaques, d'épilepsie ou d'appareils dentaires.

Enlevez tous vos bijoux et métaux avant le traitement.





## **8. Méthode de traitement (cuir chevelu)**

1. Le traitement commence par une séparation des cheveux en quatre-cinq parties différentes, puis par un démêlage en douceur.
  2. Ensuite, placez le peigne sur différentes parties du cuir chevelu affecté. Maintenez l'électrode en contact avec le cuir chevelu à tout moment.
- Durée du traitement 10-15 minutes.

